

femometer



Femometer VINCA II

# Bazální teploměr

FM-VC-201 Česky/Slovensky

CE 0197



Před prvním použitím je spotřebitel povinen se seznámit s instrukcemi a zásadami bezpečného používání výrobku.

## OBSAH

1. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	3	9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	12
2. JAK POUŽÍVAT FEMOMETER	3	10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI	12
3. VÝSTRAHY A ZVUKY	7	11. KALIBRACE	13
4. O DISPLEJI	8	12. PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH	13
5. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ	9	13. DALŠÍ INFORMACE	14
6. ÚDRŽBA PŘÍSTROJE A VAROVÁNÍ	10	14. VÝZNAM SYMBOLŮ	15
7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE	11	15. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	16
8. FUNKCE A VLASTNOSTI PRODUKTU	11		

## 1. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

---

Digitální bazální teploměr je určen pro měření a zaznamenávání bazální tělesné teploty (BTT) jako pomoc při předpovídání ovulace pro podporu při početí (neslouží jako antikoncepční metoda).

iOS 8.0+  
iPhone 5s+  
Android 4.3+  
Bluetooth 4.0/4.1

## 2. JAK POUŽÍVAT FEMOMETER

---


### 1) Stažení aplikace

Pro stažení vyhledejte „Femometer“ v Apple Store nebo Google play.




## 2) Spárujte Femometer se svým smartphonem


Krok 1: Sejměte kryt z teploměru Femometer.

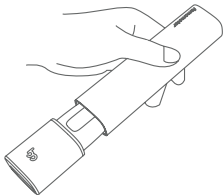

Krok 2: Zapněte funkci Bluetooth ve svém telefonu.

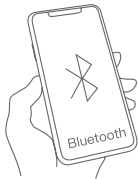

Krok 3: Postupujte podle pokynů ve svém telefonu.

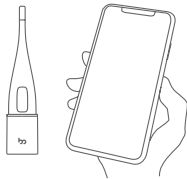

### 3) Měření teploty

Krok 1: Nastavte si v telefonu budík a každé ráno si změřte teplotu.



Krok 2: Po probuzení vyjměte Femometer z pouzdra, umístěte jej pod jazyk a počkejte 1–3 minuty, dokud neuslyšíte 3 pípnutí oznamující, že teplota byla změřena.




Krok 3: Otevřete aplikaci, údaje budou automaticky přeneseny.




#### 4) Výměna baterie


Krok 1: Vložte nástroj z nerezové oceli do štěrbině na základně teploměru Femometer a jemně otevřete prostor pro baterii.

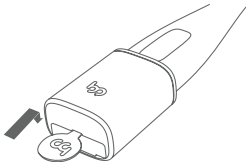

Krok 2: Vložte baterii CR2032 do prostoru pro baterii.

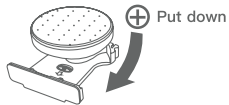

Krok 3: Zavřete prostor pro baterii na základně teploměru Femometer.

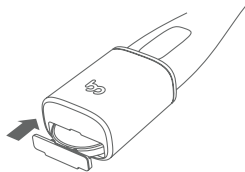

#### **Bezpečnostní upozornění pro baterie:**

- Udržujte baterii mimo dosah dětí i zvířat.
- Nevyhazujte opotřebované nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohně či do topných zařízení, ale odevzdejte je ve sběrnách nebezpečného odpadu.

## 5) Nahrání dat do aplikace

Krok 1: Po změření teploty musí být zapnutá funkce Bluetooth v telefonu, aby se mohla data přenést z teploměru Femometer do vašeho telefonu.

Krok 2: Data z teploměru Femometer se automaticky synchronizují s aplikací Femometer. Pokud se data nesynchronizují, sejměte kryt z teploměru Femometer a klepněte do kruhu stupnice v aplikaci Femometer.

**Upozornění:** Aplikace Femometer je poskytována třetí stranou. Společnost elem6 s.r.o. nenesé žádnou odpovědnost za vámi poskytnutá data.



- Aplikace není zdravotnickým prostředkem. Aplikace slouží pouze pro uchovávání naměřených dat v mobilním zařízení. Uložená naměřená data nejsou odesílána ani nikterak konzultována s lékaři.
- Aplikace nenahrazuje jakékoli konzultace s odborníkem, především lékařem, ani jakoukoli lékařskou péči. Neslouží ani k diagnostickým účelům.
- V případě otázek ohledně vašeho zdravotního stavu se vždy obraťte na svého lékaře.
- Poskytovatel aplikace ani společnost elem6 s.r.o. nejsou poskytovatelé zdravotní péče ani lékařských konzultací.





## 3. VÝSTRAHY A ZVUKY

---

- Když vyjmete Femometer z pouzdra, oznamuje jedno pípnutí, že je zapnutý.
- Po uzavření pouzdra oznamuje jedno pípnutí, že je Femometer vypnutý.
- Při měření teploty oznamují 3 pípnutí po sobě, že bylo měření dokončeno.
- Pípnutí trvajícím déle než 2 sekundy oznamuje chybu. Zavřete prosím pouzdro a znovu otevřete Femometer, aby mohlo měření proběhnout.

## 4. O DISPLEJI

1. Sejměte horní kryt teploměru pro odkrytí obrazovky  měření bude zahájeno poté, co se rozsvítí LED podsvícení, a uslyšíte pípnutí.
2. Pro prodloužení životnosti baterie se obrazovka vypne poté, co se zobrazí  po dobu 5 vteřin po měření.

Symptomy	Možné příčiny	Řešení
	Při měření je teplota nižší než 32,00 °C.	Pokud se na teploměru zobrazuje „Lo“ i během měření, nasadte kryt, počkejte jednu minutu a proveďte měření znovu.
	Při měření je teplota vyšší než 42,00 °C.	Nasadte kryt, počkejte jednu minutu a proveďte měření znovu.
	Chyba hardwaru	Vyjměte baterii a počkejte jednu minutu. Vložte baterii zpět. Pokud se zpráva zobrazí znovu, kontaktujte prosím prodejce.
	Rozsvícení a blikání symbolu	Vyměňte prosím baterii (CR2032).



## 5. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Symptomy	Možné důvody	Řešení
Nikdy neslyším tón oznamující ukončení měření, když je Femometer pod mým jazykem.	Femometer je vypnutý.	Zavřete kryt a znovu jej sejměte pro restartování zařízení Femometer.
	Doba měření je příliš krátká.	Pokračujte v měření déle než 10 sekund.
	Knoflíková baterie se vybila.	Vyměňte knoflíkovou baterii.
Data se nesynchronizovala s aplikací po mém měření.	Funkce Bluetooth není spuštěna.	Spusťte funkci Bluetooth v telefonu.
	Telefon je pro synchronizaci příliš daleko.	Přiblížte telefon blíže k zařízení Femometer.
Při otevírání teploměru Femometer není slyšet žádný zvuk.	Knoflíková baterie se vybila nebo je Femometer poškozený.	Pokud výměna knoflíkové baterie nepomůže, Femometer je poškozený.

## 6. ÚDRŽBA PŘÍSTROJE A VAROVÁNÍ

---

- Dobrá údržba tohoto přístroje zajistí bezproblémový provoz a omezí nebezpečí poškození.
- Před a po každém použití očistěte špičku zařízení Femometer roztokem 75% čistého lihu a 25% vody.
- Při čištění zařízení nepoužívejte jiné čisticí prostředky než alkohol a vodu, protože by mohlo dojít k poškození nebo zkrácení činnosti produktu a/ nebo by to mohlo představovat bezpečnostní rizika.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody – mohlo by dojít k poškození zařízení a k zobrazování chybných údajů.
- Uchovávejte přístroj mimo extrémní vlhkost a teploty a nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
- Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Nevystavujte přístroj náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř zařízení, což by mohlo přístroj poškodit. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte přístroj dokonale vyschnout.

- Povrch displeje se může snadno poškrábat. Nedotýkejte se jej ostrými předměty.
- Zásadně nečistěte přístroj, když je zapnutý. K čištění displeje a vnějšího povrchu přístroje používejte měkký netřepivý hadřík. Nečistěte displej papírovými utěrkami.
- Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
- Aby se zabránilo krádeži, nenechávejte přístroj a příslušenství na viditelném místě ve vozidle bez dozoru.
- Přehřátí může přístroj poškodit.
- Balení obsahuje malé dílky, které mohou být nebezpečné pro děti. Produkt vždy ukládejte mimo dosah dětí. Sáčky nebo mnoho dílků, které obsahují, mohou po spolknutí nebo po nasazení na hlavu způsobit udušení.

## 7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

---

### Název produktu

Vinca II

### Model

FT-VC-201

### Rozměry

120,2 mm x 24,4 mm x 16,4 mm

### Hmotnost

24,8 g (bez baterie)

### Vzdálenost přenosu

Až 4,8 m

### Přijímač

Zařízení Apple: iPhone 5 nebo vyšší nejméně s IOS 8.0; s výjimkou iPhone 4/4s. Zařízení Android: Verze 4.3 nebo vyšší a podpora Bluetooth 4.0/4.1

### Výdrž baterie

3-6 měsíců

### Provozní podmínky

Teplota: 5 °C–40 °C

### Stupeň krytí IP (Ingress Protection)

IP 22

### Měření

32 °C–42 °C

### Přesnost

±0,05 °C (35 °C–38 °C)

±0,1 °C (32 °C–35 °C)

a (38 °C –42 °C)

### Baterie

CR2032

## 8. FUNKCE A VLASTNOSTI PRODUKTU

---

### 1. Měření bazální tělesné teploty a Bluetooth

- Femometer měří bazální tělesnou teplotu s přesností na 0,09 °F (0,05 °C). Vaše bazální tělesná teplota se automaticky nahrává do vašeho telefonu prostřednictvím připojení Bluetooth.
- Údaje se zobrazují v diagramech a grafech teploty, které umožňují sledování a rozhodování o vašem menstruačním cyklu.

### 2. Údaje se ukládají do cloudu

- Všechny vaše údaje se ukládají do cloudu, takže je nemusíte nahrávat ručně a nemusíte se obávat jejich ztráty.

### 3. Sdílení údajů s přáteli

- Sdílejte své údaje jednoduše se svým partnerem nebo lékařem přímo z aplikace Femometer prostřednictvím Twitteru nebo Facebooku.

## 9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

---

1. EMC produktu odpovídá standardu IEC60601-1-2.
2. Materiál, který přichází do kontaktu s kůží je netoxický, nedráždivý a odpovídá standardu ISO10993-1,-5,-10.
3. Vždy se poraďte se svým lékařem. Určování vlastní diagnózy a samoléčení na základě výsledků domácího měření je nebezpečné.
4. Jakákoli závažná nežádoucí příhoda se zařízením musí být nahlášena výrobci a příslušnému státnímu kontrolnímu orgánu (SÚKL, ŠÚKL).

## 10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

---

- Tento návod je v souladu s dostupnými informacemi a obsahy a může být kdykoli změněn bez předchozího upozornění. Společnost Bangtang udělala vše pro to, aby zajistila přesnost a spolehlivost této příručky. Společnost však nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo poškození způsobené vynecháním informací, nepřesnostmi nebo typografickými chybami v této příručce.
- Vzniknou-li v této příručce nesrovnalosti z důvodu aktualizací softwaru, jsou platné pokyny a funkce stanovené softwarem. Pokud budou provedeny změny produktu nebo technologie, navštivte prosím web technické podpory Bongmi, kde naleznete další informace.
- Všechny symboly a loga spojená s technologií Bluetooth, včetně slovní značky Bluetooth, obrázku, kombinace značky a značek Bluetooth Smart a Bluetooth ready, jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG. Jakékoli využívání těchto značek společností Bangtang podléhá licenci. Jiné ochranné známky a obchodní názvy náleží svým příslušným vlastníkům.

## 11. KALIBRACE

---

Teploměr je kalibrován při výrobě. Pokud se teploměr používá v souladu s návodem k použití, není potřeba provádět pravidelné opětovné nastavování. Doporučujeme však zkontrolovat kalibraci každé dva roky nebo vždy, když není jistá klinická přesnost teploměru. Zapněte teploměr, vložte jej do vodní lázně a ověřte laboratorní přesnost. Prodejcům nebo výrobcům zasílejte prosím kompletní zařízení. Požadavky na laboratorní přesnost ASTM při zobrazování  $\pm 0,05$  °C (35 °C–38 °C),  $\pm 0,1$  °C (32 °C–35 °C) a (38 °C–42 °C).

Výše uvedená doporučení podléhají zákonným požadavkům. Uživatel musí dodržovat zákonné požadavky pro kontrolu měření, funkčnost a přesnost zařízení v rozsahu platných zákonů, směrnic nebo předpisů podle toho, kde se zařízení používá.

## 12. PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH

---

Společnost Hangzhou Bangtang Network Technology Co., Ltd. si vyhrazuje veškerá práva a zachovává si konečné právo výkladu a revize této příručky a prohlášení v ní obsažených. Autorská práva k této příručce náleží společnosti Hangzhou Bangtang Network Technology Co., Ltd. Bez předchozího písemného souhlasu nesmí žádná společnost ani jednotlivec reprodukovat, kopírovat ani překládat informace zde obsažené.

Hangzhou Bangtang Network Technology Co.,Ltd., Floor 12,92 Yueda Street, Binjiang District, Hangzhou, Čína.

## 13. DALŠÍ INFORMACE

1) **Pro domácnosti:** Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



**Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití):** Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvi-

daci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců.

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

## Doporučení a prohlášení výrobce k elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

Kvůli velkému množství elektronických zařízení, jako jsou osobní počítače a mobilní telefony, mohou být zdravotnická zařízení náchylná k elektromagnetickému rušení jiných zařízení. Elektromagnetické rušení může způsobit poruchu zdravotnického zařízení a vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

Kromě toho by zdravotnické prostředky neměly interferovat s jinými zařízeními.

K regulaci požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) byla použita norma EN60601-1-2, aby se zabránilo nebezpečným událostem způsobeným výrobkem. Norma definuje úroveň citlivosti na elektromagnetické rušení a maximální úroveň elektromagnetických emisí pro zdravotnické prostředky.

**Tento zdravotnický prostředek byl vyroben v souladu s EN60601-1-2: 2015. Zařízení by mělo být provozováno za níže uvedených podmínek:** V blízkosti zdravotnického zařízení nepoužívejte mobilní telefony ani jiná zařízení, která vytvářejí silná elektrická a elektromagnetická pole. To může způsobit poruchu a způsobit potenciálně nebezpečnou situaci. Doporučuje se minimální vzdálenost 7 m. Zkontrolujte činnost zařízení na větší vzdálenost.

## 14. VÝZNAM SYMBOLŮ



Výrobce



Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze



Číslo šarže



Typ BF



Zplnomocněný zástupce výrobce v EU



Dovozce

## 15. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

---

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení FM-VC-201 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 93/42/EEC. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu: [www.elem6.com/support/doc](http://www.elem6.com/support/doc)

### **Dovozce:**

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika

### **Výrobce:**

JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD. No.365,Wuzhou Road,  
Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100 Zhejiang,  
China

### **Zplnomocněný zástupce výrobce:**

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Vyrobeno v Číně.

Datum poslední revize: 2021-05



**Tiskové chyby a změny v manuálu jsou vyhrazeny.**





Pred prvým použitím je spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s inštrukciami a zásadami bezpečného používania výrobku.

## OBSAH

1. ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE	18	9. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	27
2. AKO POUŽÍVAŤ FEMOMETER	18	10. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI	27
3. VÝSTRAHY A ZVUKY	22	11. KALIBRÁCIA	28
4. O DISPLEJI	23	12. INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH	28
5. RIEŠENIE PROBLÉMOV	24	13. ĎALŠIE INFORMÁCIE	29
6. ÚDRŽBA PRÍSTROJA A VAROVANIE	25	14. VÝZNAM SYMBOLOV	30
7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	26	15. PREHLÁSENIE O ZHODE	31
8. FUNKCIE A VLASTNOSTI PRODUKTU	26		

## 1. ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

---

Digitálny bazálny teplomer je určený pre meranie a zaznamenávanie bazálnej telesnej teploty (BTT) ako pomoc pri predpovedaní ovulácie pre podporu pri počatí (neslúži ako antikoncepčná metóda).

iOS 8.0+  
iPhone 5s+  
Android 4.3+  
Bluetooth 4.0/4.1

## 2. AKO POUŽÍVAŤ FEMOMETER

---


### 1) Stiahnutie aplikácie

Pre stiahnutie vyhľadajte „Femometer“ v Apple Store alebo Google Play.




## 2) Spárujte Femometer so svojím smartphonom


Krok 1: Odstráňte kryt z teplomera Femometer.

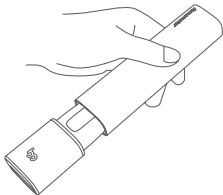

Krok 2: Zapnite funkciu Bluetooth vo svojom telefóne.

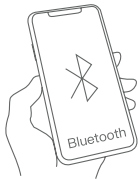

Krok 3: Postupujte podľa pokynov vo svojom telefóne.

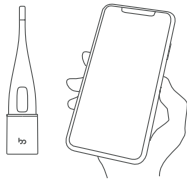

### 3) Meranie teploty

Krok 1: Nastavte si v telefóne budík a každé ráno si zmerajte teplotu.



Krok 2: Po prebudení vyberte Femometer z puzdra umiestnite ho pod jazyk a počkajte 1-3 minúty, kým nebudete počuť 3 pípnutia oznamujúce, že teplota bola zmeraná.




Krok 3: Otvorte aplikáciu, údaje budú automaticky prenesené.




#### 4) Výmena batérie


Krok 1: Vložte nástroj z nerezovej ocele do štrbiny na základni teplomera Femometer a jemne otvorte priestor pre batériu.

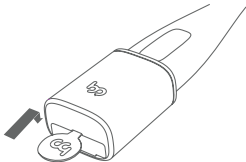

Krok 2: Vložte batériu CR2032 do priestoru pre batériu.

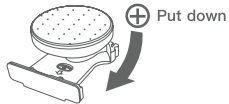

Krok 3: Zatvorte priestor pre batériu na základni teplomera Femometer.

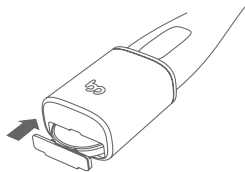

#### Bezpečnostné upozornenia pre batérie:

- Udržujte batériu mimo dosahu detí i zvierat.
- Nevyhadzujte opotrebované alebo poškodené batérie do odpadkového koša, ohňa či do vykurovacích zariadení, ale odovzdajte ich v zberniach nebezpečného odpadu.

## 5) Nahrание dát do aplikácie

Krok 1: Po zmeraní teploty musí byť zapnutá funkcia Bluetooth v telefóne, aby sa mohli dáta preniesť z teplomera Femometer do vášho telefónu.

Krok 2: Dáta z teplomera Femometer sa automaticky synchronizujú s aplikáciou Femometer. Ak sa dáta nesynchronizujú, vyberte kryt z teplomera Femometer a kliknite do kruhu stupnice v aplikácii Femometer.

**Upozornenie:** Aplikácia Femometer je poskytovaná treťou stranou. Spoločnosť elem6 s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za vami poskytnuté dáta.



- Aplikácia nie je zdravotníckou pomôckou. Aplikácia slúži len na uchovávanie nameraných dát v mobilnom zariadení. Uložené namerané dáta sa neposielajú ani nie sú nijako konzultované s lekármi.
- Aplikácia nenahrádza akékoľvek konzultácie s odborníkom, predovšetkým lekárom, ani akúkoľvek lekársku starostlivosť. Neslúži ani na diagnostické účely.
- V prípade otázok ohľadom vášho zdravotného stavu sa vždy obráťte na svojho lekára.
- Poskytovateľ aplikácie ani spoločnosť elem6 s.r.o. nie sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ani lekárske konzultácie.





## 3. VÝSTRAHY A ZVUKY

---

- Keď vyberiete Femometer z púzdra, oznamuje jedno pípnutie, že je zapnutý.
- Po uzavretí púzdra oznamuje jedno pípnutie, že je Femometer vypnutý.
- Pri meraní teploty oznamujú 3 pípnutia po sebe, že bolo meranie dokončené.
- Pípnutie trvajúce dlhšie ako 2 sekundy oznamuje chybu. Zatvorte prosím púzdro a znova otvorte Femometer, aby mohlo meranie prebehnúť.

## 4. O DISPLEJI

1. Zložte horný kryt teplomeru pre odkrytie obrazovky  meranie sa začne potom, čo sa rozsvieti LED podsvietenie, a budete počuť pípnutie.
2. Pre predĺženie životnosti batérie sa obrazovka vypne potom, čo sa zobrazí  po dobu 5 sekúnd po meraní.

Symptómy	Možné príčiny	Riešenie
	Pri meraní je teplota nižšia ako 32,00 °C.	Ak sa na teplomere zobrazuje "Lo" aj počas merania, nasadte kryt, počkajte jednu minútu a vykonajte meranie znova
	Pri meraní je teplota vyššia ako 42,00 °C.	Nasadte kryt, počkajte jednu minútu a vykonajte meranie znova.
	Chyba hardvéru	Vyberte batériu a počkajte jednu minútu. Vložte batériu späť. Ak sa hlásenie zobrazí znova, kontaktujte prosím predajcu.
	Rozsvietenie a blikanie symbolu	Vymeňte prosím batériu (CR2032).

## 5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Symptómy	Možné dôvody	Riešenie
Nikdy nepočujem Tón oznamujúci ukončenie merania, keď je Femometer pod mojím jazykom.	Femometer je vypnutý.	Zatvorte kryt a znovu ho otvorte pre reštartovanie zariadenia Femometer.
	Doba merania je príliš krátka.	Pokračujte v meraní dlhšie ako 10 sekúnd.
	Gombíková batéria sa vybila.	Vymeňte gombíkovú batériu.
Dáta sa nesynchronizovali s aplikáciou po mojom meraní.	Funkcia Bluetooth nie je spustená.	Spustite funkciu Bluetooth v telefóne.
	Telefón je pre synchronizáciu príliš ďaleko.	Priblížte telefón bližšie k zariadeniu Femometer.
Pri otváraní teplomera Femometer nie je počuť žiadny zvuk.	Gombíková batéria sa vybila alebo je Femometer poškodený.	Ak výmena gombíkové batérie nepomôže, Femometer je poškodený.



## 6. ÚDRŽBA PRÍSTROJA A VAROVANIE

---

- Dobrá údržba tohto prístroja zaistí bezproblémovú prevádzku a obmedzí riziko poškodenia.
- Pred a po každom použití očistite špičku zariadenia Femometer roztokom 75% čistého liehu a 25% vody.
- Pri čistení zariadenia nepoužívajte iné čistiace prostriedky ako alkohol a vodu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo skráteniu činnosti produktu a / alebo by to mohlo predstavovať bezpečnostné riziká.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody - mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a k zobrazovaniu chybných údajov.
- Uchovávajte prístroj mimo extrémnu vlhkosť a teploty a nevystavujte prístroj dlhodobo priamemu slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.
- Zabráňte pádu prístroja ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Nevystavujte prístroj náhlým a prudkým zmenám teplôt. Mohlo by to spôsobiť kondenzovanie vlhkosti vo vnútri zariadenia, čo by mohlo prístroj poškodiť. V prípade, keď dôjde ku kondenzácii vlhkosti, pred ďalším používaním nechajte prístroj dokonale vyschnúť.

- Povrch displeja sa môže ľahko poškriabať. Nedotýkajte sa ho ostrými predmetmi.
- Zásadne nečistite prístroj, keď je zapnutý. Na čistenie displeja a vonkajšieho povrchu prístroja používajte mäkkú handričku nepúšťajúcu vlákna. Nečistite displej papierovými utierkami.
- Zásadne sa nepokúšajte prístroj rozoberať, opravovať alebo akokoľvek upravovať. V prípade demontáže, úprav alebo akéhokoľvek pokusu o opravu dochádza k prepadnutiu záruky a môže dôjsť k poškodeniu prístroja či dokonca k zraneniu alebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály pohromade s prístrojom, jeho časťami alebo doplnkami.
- Aby sa zabránilo krádeži, nenechávajte prístroj a príslušenstvo na viditeľnom mieste vo vozidle bez dozoru.
- Prehriatie môže prístroj poškodiť.
- Balenie obsahuje malé dieliky, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Produkt vždy ukladajte mimo dosahu detí. Vrecká alebo veľa dielikov, ktoré obsahujú, môžu po prehltnutí alebo po nasadení na hlavu spôsobiť udušenie.

## 7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

---

### Názov produktu

Vinca II

### Model

FT-VC-201

### Rozmery

120,2 mm x 24,4 mm x 16,4 mm

### Hmotnosť

24,8 g (bez batérie)

### Vzdialenosť prenosu

Až 4,8 m

### Prijímač

Zariadenia Apple: iPhone 5 alebo vyšší najmenej s IOS 8.0; s výnimkou iPhone 4/4s. Zariadenia Android: Verzia 4.3 alebo vyššia a podpora Bluetooth 4.0/4.1

### Výdrž batérie

3-6 mesiacov

### Prevádzkové podmienky

Teplota: 5 °C–40 °C

### Stupeň krytia IP (Ingress Protection)

IP 22

### Meranie

32 °C–42 °C

### Presnosť

±0,05 °C (35 °C–38 °C)

±0,1 °C (32 °C–35 °C)

a (38 °C –42 °C)

### Batéria

CR2032

## 8. FUNKCIE A VLASTNOSTI PRODUKTU

---

### 1. Meranie bazálnej telesnej teploty a Bluetooth

- Femometer meria bazálnu telesnú teplotu s presnosťou 0,09 °F (0,05 °C). Vaša bazálna telesná teplota sa automaticky nahráva do vášho telefónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
- Údaje sa zobrazujú v diagramoch a grafoch teploty, ktoré umožňujú sledovanie a rozhodovanie o vašom menštruačnom cykle.

### 2. Údaje sa ukladajú do cloudu

- Všetky vaše údaje sa ukladajú do cloudu, takže ich nemusíte nahrávať ručne a nemusíte sa obávať ich straty.

### 3. Zdieľanie údajov s priateľmi

- Zdieľajte svoje údaje jednoducho so svojim partnerom alebo lekárom priamo z aplikácie Femometer prostredníctvom Twitteru alebo Facebooku.

## 9. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

---

1. EMC produktu zodpovedá štandardu IEC60601-1-2.
2. Materiál, ktorý prichádza do kontaktu s pokožkou je netoxický, nedráždivý a zodpovedá štandardu ISO10993-1, -5, -10.
3. Vždy sa poraďte so svojim lekárom. Určovanie vlastnej diagnózy a samoliečba na základe výsledkov domáceho merania sú nebezpečné.
4. Akákoľvek závažná nežiaduca príhoda so zariadením musí byť nahlásená výrobcovi a príslušnému štátnemu dozornému orgánu (SÚKL alebo SÚKL).

## 10. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

---

- Tento návod je v súlade s dostupnými informáciami a obsahmi a môže byť kedykoľvek zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Bangtang urobila všetko pre to, aby zabezpečila presnosť a spoľahlivosť tejto príručky. Spoločnosť však nepreberá zodpovednosť za stratu alebo poškodenie spôsobené vynechaním informácií, nepresnosťami alebo typografickými chybami v tejto príručke.
- Ak vzniknú v tejto príručke nezrovnalosti z dôvodu aktualizácií softvéru, sú platné pokyny a funkcie ustanovené softvérom. Ak budú vykonané zmeny produktu alebo technológie, navštívte prosím web technickej podpory Bongmi, kde nájdete ďalšie informácie.
- Všetky symboly a logá spojená s technológiou Bluetooth, vrátane slovné značky Bluetooth, obrázku, kombinácia značky a značiek Bluetooth Smart a Bluetooth ready, sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG. Akékoľvek využívanie týchto značiek spoločnosťou Bangtang podlieha licencií. Iné ochranné známky a obchodné názvy patria svojim príslušným vlastníkom.

## 11. KALIBRÁCIA

---

Teplomer je kalibrováný pri výrobe. Ak sa teplomer používa v súlade s návodom na použitie, nie je potrebné vykonávať pravidelné opätovné nastavovanie. Odporúčame však skontrolovať kalibráciu každé dva roky alebo vždy, keď si nie ste istí klinickou presnosťou teplomeru. Zapnite teplomer, vložte ho do vodného kúpeľa a overte laboratórne presnosť. Predajcom alebo výrobcom zasielajte prosím kompletne zariadenie. Požiadavky na laboratórne presnosť ASTM pri zobrazovaní  $\pm 0,05$  °C (35 °C – 38 °C),  $\pm 0,1$  °C (32 °C – 35 °C) a (38 °C – 42 °C).

Vyššie uvedené odporúčania podliehajú zákonným požiadavkám. Užívateľ musí dodržiavať zákonné požiadavky na kontrolu merania, funkčnosť a presnosť zariadení v rozsahu platných zákonov, smerníc alebo predpisov podľa toho, kde sa zariadenie používa.

## 12. INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

---

Spoločnosť Hangzhou Bangtang Network Technology Co., Ltd. si vyhradzuje všetky práva a zachováva si konečné právo výkladu a revízie tejto príručky a vyhlásenia v nej obsiahnutých. Autorské práva k tejto príručke patria spoločnosti Hangzhou Bangtang Network Technology Co., Ltd. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nesmie žiadna spoločnosť ani jednotlivец reprodukovať, kopírovať ani prekladať informácie tu obsiahnuté.

Hangzhou Bangtang Network Technology Co., Ltd., Floor 12, 92 Yueda Street, Binjiang District, Hangzhou, Čína.

### 13. ĎALŠIE INFORMÁCIE

1) **Pre domácnosti:** Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



**Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie):** Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu

likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadení. Všetko vyjadruje symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačných materiáloch.

2) Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa takisto vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neštandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, zaobchádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebovaním. Záručná doba na batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov.

Výrobca, dovozca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené montážou alebo nesprávnym užívaním produktu.

### **Odporúčania a vyhlásenie výrobcu k elektromagnetickej kompatibiliti (EMC)**

Kvôli veľkému množstvu elektronických zariadení, ako sú osobné počítače a mobilné telefóny, môžu byť zdravotnícke zariadenia náchylné k elektromagnetickému rušeniu iných zariadení. Elektromagnetické rušenie môže spôsobiť poruchu zdravotníckeho zariadenia a vytvoriť potenciálne nebezpečnú situáciu.

Okrem toho by zdravotnícke pomôcky nemali interferovať s inými zariadeniami.

Na reguláciu požiadaviek na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) bola použitá norma EN60601-1-2, aby sa zabránilo nebezpečným udalostiam spôsobeným produktom. Norma definuje úrovne citlivosti na elektromagnetické rušenie a maximálnej úrovne elektromagnetických emisií pre zdravotnícke pomôcky.

**Tento zdravotnícky prostriedok bol vyrobený v súlade s EN60601-1-2: 2015. Zariadenie by malo byť prevádzkované za podmienok uvedených nižšie:** V blízkosti zdravotníckeho zariadenia nepoužívajte mobilné telefóny ani iné zariadenia, ktoré vytvárajú silné elektrické a elektromagnetické polia. To môže

spôsobiť poruchu a spôsobiť potenciálne nebezpečnú situáciu. Odporúča sa minimálna vzdialenosť 7 m. Skontrolujte činnosť zariadení na väčšiu vzdialenosť.

## **14. VÝZNAM SYMBOLOV**



Výrobca



Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu



Číslo šarže



Typ BF



Splnomocnený zástupca výrobcu v EÚ



Dovozca

## 15. PREHLÁSENIE O ZHODE

---

Spoločnosť elem6 s.r.o. týmto prehlasuje, že zariadenie FM-VC-201 je vzhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 93/42 / EEC. Vyhlásenie o zhode možno stiahnuť z webu: [www.elem6.com/support/doc](http://www.elem6.com/support/doc)

**Dovozca:**

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika

**Výrobca:**

JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD. No.365,Wuzhou Road,  
Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100 Zhejiang,  
China

**Splnomocnený zástupca výrobcu:**

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Vyrobené v Číne.

Dátum poslednej revízie: 2021-05



**Tlačové chyby a zmeny v manuáli sú vyhradené.**

